

Hwato-Magnetpflaster 20 Stück

Akupunktur-Magnete funktionieren durch die Magnetfelder auf den Haupt- und Nebenkanälen der Energie-meridiane. Der wohltuende Effekt basiert auf beruhigenden, Blockaden lösenden, Qi-Fluss verbessernden Effekten. Die Magnetfelder durchdringen Haut, Gewebe und die Muskulatur und üben dadurch einen positiven Einfluss aus.


Zu beachten:

1. Haut muss gut entfettet sein (Kein Öl, Kosmetika oder Wasser auf Händen oder Haut).
2. Effekt wird verstärkt wenn die Magnetpflaster nach dem Training, nach dem Bad oder generell nach dem Schwitzen appliziert wird. Zur Unterstützung Punkte auf Grafik berücksichtigen.
3. Kann während dem Duschen, Baden auf der Haut belassen werden (bitte beachten Sie Punkt 1).
4. Niemals auf offenen Wunden oder oberflächlichen Entzündungen anwenden.
5. Bei Jucken oder schmerzhaften Nebeneffekten muss die Behandlung abgebrochen werden.
6. Nach der Behandlung das Pflaster vorsichtig ablösen (kein abruptes Abreißen).

Lagerung: Magnete nicht aufeinander falten, das sie sich bei kontermagnetischem Lagern der Magneteffekt negativ beeinflusst wird. Kühl lagern (nicht im Kühlschrank) und keiner Lichtquelle aussetzen. Nicht mit Gegenständen lagern welche sich magnetisch aufladen können (z. B. Uhr mit automatischem Werk) da dessen Funktionen negativ beeinträchtigt werden können.

Personen mit bösartigen Tumoren, Herzerkrankungen, abnormalem Blutdruck, Fieber, Schwangere und Kinder sollten vor der Anwendung den Arzt, Apotheker oder Drogisten konsultieren. Personen mit Herzschrittmacher dürfen das Produkt nicht verwenden.

Vertrieb: PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co.,
Bergtalweg 2a, 9500 Wil SG, Switzerland

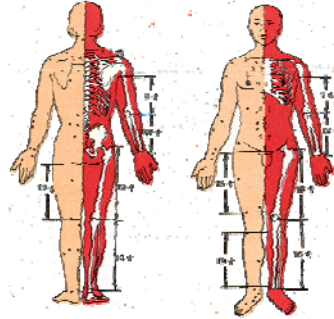

Hwato-emplâtre magnétique 20 pièces

Les aimants d'acupuncture fonctionnent à travers les champs magnétiques sur le canaux des méridiens d'énergie. L'effets bienfaits fondé sur l'effet améliorant le Qi-flux, détachant des blocus, rassurant. Les champs magnétiques prennent de la peau, du tissu et la musculature et exercent par cela une influence positive.

A Suivre :

1. La peau doit être dégraissée bien (Aucune huile, produits beauté ou de l'eau sur des mains ou de la peau).
2. L'effet est renforcé quand les emplâtres magnétiques après l'entraînement, au bain ou général après la transpiration est appliqué. Tenir compte de points au soutien sur la graphique.
3. Peut être laissé pendant le doucher ou le bain sur la peau (s'il vous plaît vous suivez le point 1).
4. Ne jamais employer sur des plaies ouvertes ou des inflammations superficielles.
5. Au prurit ou aux effets secondaires douloureux on doit détacher le traitement.
6. Détacher après l'application de l'emplâtre prudemment (aucun abrupt rompre).

Stockage : Plier pas les aimants l'un sur l'autre, qu'elle camps conter magnétique l'effet magnétique est influencé négativement par des camps conter-magnétiques. Stockage fraîche (pas dans le réfrigérateur). Evitez des source lumineuse. Ne pas stocker avec des objets lesquels peuvent se charger magnétiquement (p. ex. Horloge/Montres automatique) puisque ses fonctions peuvent être gênées négativement.

Les personnes avec des tumeurs méchantes, les maladies cardiaques, pression artérielle anormale, les fièvres, d'enceintes et les enfants devraient consulter le médecin, pharmacien ou droguiste avant l'emploi. Les personnes avec le stimulateur cardiaque ne peuvent pas utiliser le produit.

Distribution: PANAX-Import, F. Ruckstuhl + Co.,
Bergtalweg 2a, 9500 Wil SG, Switzerland

